



### Диафаноскоп (трансиллюминатор) + Рукоятка на батарейках Kirchner & Wilhelm \*Co, Германия



#### Уход за инструментами:

**Рукоятка:** Загрязненную поверхность очистить одноразовой/бумажной салфеткой.

**Хранение и транспорт:** Никаких особых требований.

**Подготовка к очистке:** Никаких особых требований.

**Ручная очистка:** Снаружи трансиллюминатор можно очищать влажной, мягкой и не ворсистой тканью. Не кладите прибор в жидкость и следите за тем, чтобы жидкость не попала в корпус! Так как прибор не предназначен для участия в оперативном вмешательстве, то достаточно простой очистки или дезинфекции средством предназначенным для очистки поверхностей на спиртовой основе. Не использовать абразивные моющие средства! Прибор не подлежит стерилизации.

**Автоматическая очистка:** Не возможна, необязательна.

**Дезинфекция:** В целях дезинфекции можно протереть салфеткой увлажнённой спиртом.

#### Комплект поставки:

- трансиллюминатор
- металлическая рукоять с регулировкой освещения
- Чехол на молнии – не входит в комплект поставки!
- Батарейки 1,5 В - не входят в комплект поставки!

Характеристики:	Диафаноскоп
Материал	Нержавеющая сталь
Тип	Волоконно-оптический

Освещение	Галогенное
Лампа	2.5 В. Галогенная
Рабочая длина диафаноскопа	50 мм. Офтальмологический (короткий)
Угол изгиба	45°
Характеристики:	Рукоятка:
Длина батареечной рукоятки	12,5 см.
Питание	Батарейки типа «С»
Напряжение питания	2.5 В
Корпус рукоятки	Металлический
Поверхность	Рифленая
Регулировка мощности освещения	Наличие (реостат)
Вес	250 г.
Документы	
Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
Декларация соответствия	Наличие
Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие